



HVAD KAN DU FORVENTE EFTER PÅBEGYNDT BEHANDLING?

Din mund kan muligvis føles øm i dagene/ugerne efter, at du er begyndt at anvende din skinne. SomnoMeds Morning Repositioner hjælper med at reponere dit bid, efter at du har brugt skinnen om natten.

Du kan opleve en øget produktion af spyt. Placer et håndklæde på din pude de første nætter for at afhjælpe problemet.

Din mund og dine læber vil kunne opleves tørre om morgenen. Hav et glas vand og læbepomade tilgængelig på natbordet.

Nogle patienter fjerner ubevidst skinnen i løbet af natten. Hvis du vågner uden din skinne i munden så find den rengør den og opbevare den i beholderen til du igen skal anvende den.

GOD KVALITET GØR EN FORSKEL

På samme måde som en special tillavet skjorte kan få dig til at føle dig mere velklædt og professionel, vil en specialtilpasset og justerbar snorke/apnøskinne hjælpe dig med at sove bedre om natten og give dig større overskud om dagen.

HØJ KOMFORT



Din tandlæge har special tillavet SomnoDent skinnen til din mund, og du vil derfor opleve den langt mere komfortabel end andre typer af skinner. Når du anvender SomnoDent-skinnen, kan du stadig tale, drikke og lukke munden helt normalt. Skinnen er diskret og stille, og 90 % av patienterne oplyser, at de ikke oplever gener ved at bære en skinne fra SomnoDent.

HØJ KVALITET



Din special tillavet SomnoDent skinne er fremstillet af den højeste kvalitet akryl der hverken misfarves eller lugter ej heller over tid. Vi tilbyder en patenteret og blød inderside, der giver øget komfort og kvalitet. Alle skinner har 2 års garanti for produktionsfejl*.

* Find garantioplysninger på www.somnomed.com



SomnoMed Nordic AB
Box 27254, 102 53 Stockholm
T: +46 851977 575
M: info@somnomed.com www.somnomed.com

SomnoMed AG er 13485 ISO-certificeret. SomnoMed-produkter er registrerede i: EU, Schweiz, USA, Canada, Australia, Syd-Korea, Japan, Hong Kong.

SomnoMed-produkter er patenterede og specialudviklede medicinsk teknisk apparatur Class I.



SomnoMed®

VELLYKKET BEHANDLING

MED SNORKE OG SØVNAPNØSKINNE

www.somnomed.com

VELLYKKET

BEHANDLING

MED SNORKE & APNØSKINNE

Snorke/apnøskinne er en enkel og komfortabel behandling af snorken og mild til moderat obstruktiv søvnapnø (OSA). Du slipper for maske, slanger og elektriske hjælpemidler. Mange af vores patienter fortæller, at dette giver en "frihedsfølelse" ikke at sove med maske, og SomnoDent snorke/apnøskinne giver en forbedret nattesøvn. I nogle tilfælde erstatter sundhedsforsikringen en skinne.

Skinnen anbringes på de øverste og nederste tænder, skinnen trækker nænsomt underkæben frem, sådan at luftvejene forbliver åbne og du kan trække vejret som normalt.

Efter din læge har henvist dig til en skinne behandling følger nogle faste trin i behandlingsforløbet.



GOD SØVN OG ENERGIFYLDTE DAGE

1

Du besøger en specialuddannet tandlæge der evaluerer din generelle tandsundhed og, hvis du vurderes som egnet, tages et aftryk af dine tænder – enten ved hjælp af en aftryksske eller en digital scanner. Informationen videresendes til produktion hos os og vi fremstiller en individuel snorke/apnøskinne.

2

Nogle uger efter dit første besøg, bliver du indkaldt til din tandlæge for at prøve skinnen, om at den passer korrekt. Samtidig bliver du instrueret i hvordan du tager den ind og ud af munden og hvordan skinnen skal rengøres og opbevares. Ved efterfølgende kontrol besøg der aftales efter behov vil din tandlæge justere skinnen.

3

Det er vigtigt, at du besøger din læge efter behandling med skinnen. Dette er for at være sikker på, at du opnår forventede resultater.

4

OSA er en kronisk lidelse som ofte kræver behandling i resten af dit liv. Du bør opleve forbedret søvn og øget energiniveau efter at din skinne er kalibreret korrekt. Snorke/apnøskinner har dog ingen garanti for at virke på alle patienter.

SOMNODENTS PRODUKTFAMILIE

For patienter med mild til moderat obstruktiv søvnapnø er SomnoDent en komfortabel og klinisk dokumenteret behandlingsform der åbner patienternes luftveje under søvn, uden brug af hverken masker eller slanger. SomnoDent benytter kun medicinalgodkendte kvalitetsmaterialer, og i vores sortiment findes produkter til forskellige typer patienter.



KLINISK DOKUMENTERET

SomnoMeds kvalitetsbevidste fokus kommer til udtryk gennem produkter der er bevist effektive i flere kliniske studier. I et af disse studier oplyste 9 ud af 10 patienter en forbedret søvnkvalitet mens de benyttede SomnoDent.



¹ AM/Respir Crit Care Med Vol 163. Pp 1457-1461, 2001

² <https://somnomed.com/us/physicians/medical-education-sleep-medicine/clinical-evidence/>